

**UTILISATION DE FILTRES SUR LES ROBINETS DANS LES CHAMBRES DE PATIENTS À RISQUE****Responsabilités**

Décision de mise en place d'un filtre pour un patient :	Médecin et responsable infirmier du patient
Mise en place, remplacement :	Personnel infirmier, aide-soignant

**Procédure****Matériel :**

- Filtre pour robinet Pall AQ14F1S - tous germes, dont *Legionella* et *Pseudomonas*
- Filtre pour douche Pall AQ7F2 - tous germes, dont *Legionella* et *Pseudomonas*
- Filtre pour douche Pall AQL3 - seulement *Legionella*
- Robinetterie adaptée pour la pose de filtre
- Marqueur indélébile

**Indications :**

- en permanence:
  - au centre des brûlés (robinet Pall AQ14F1S et douche Pall AQ7F2)
  - en néonatalogie (robinet Pall AQ14F1S et douche Pall AQL3)
- selon les besoins:
  - dans les box des soins intensifs, unités 1-2, 4-5 et soins intensifs de pédiatrie, lors d'hébergement de patients récemment transplantés ou admis pour un épisode de rejet (robinet Pall AQ14F1S)
  - dans les soins continus et les chambres du BH15 et du BH16 avec robinetterie adaptée pour recevoir ces filtres, lors d'hébergement de patients récemment transplantés ou admis pour un épisode de rejet (robinet Pall AQ14F1S et douche Pall AQ7F2)

**Mise en place :**

1. Se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique
2. Ouvrir le sachet contenant le filtre
3. Incrire sur le filtre la date du jour au marqueur indélébile
4. Connecter le filtre au robinet ou au tuyau de douche en soulevant la bague de raccordement

**Utilisation :**

Les précautions suivantes doivent être prises durant l'utilisation d'un filtre afin d'éviter sa contamination rétrograde :

- ne pas verser d'eaux usées dans l'évier
- ne pas nettoyer le filtre
- éviter de toucher l'extrémité du filtre

Le filtre doit être remplacé par un filtre neuf lorsqu'il est obstrué ou au plus tard après :

- 14 jours d'utilisation pour les filtres pour robinet Pall AQ14F1S
- 7 jours d'utilisation pour les filtres pour douche Pall AQ7F2 (au centre des brûlés, les filtres pour douche sont changés après chaque patient)
- 4 semaines d'utilisation pour les filtres pour douche Pall AQL3

Filtre pour robinet Pall AQ14F1S



Filtre pour douche Pall AQL3

