



Fiche technique III

masque et lunettes ou masque à visière

Activités nécessitant le port de protection faciale

Type d'activité (liste non exhaustive)	Type de matériel
Procédures invasives Ponctions, pose de cathéter Aspiration bronchique Pour les soins prolongés et à risque particulier de projections Interventions chirurgicales Interventions endoscopiques Accouchements Soins dentaires Manipulation ou nettoyage présentant un risque d'éclaboussures de liquides biologiques	Masques médicaux et Lunettes de protection OU Masque à visière



Seuls les masques médicaux (3 couches) de type 2R et résistants aux projections de fluides garantissent une protection

Types de masques médicaux



Chirurgicaux à élastiques



Chirurgicaux à lanières



Chirurgicaux à visière



Mode d'emploi

Masque à élastique :



1. passer les anses autour des oreilles



2. ouvrir et ajuster les soufflets de manière à recouvrir le nez et le menton.



3. ajuster la barrette rigide de façon à ce qu'elle épouse les contours du nez et des pommettes



4. se désinfecter les mains après avoir mis le masque

Masque à lanières : à utiliser de préférence avec un bonnet (charlotte)



1. fixer les liens supérieurs en les passant au-dessus des oreilles



2. les liens inférieurs au niveau de la nuque



3. ne pas les croiser



4. ouvrir et ajuster les soufflets de manière à recouvrir le nez et le menton



5. ajuster la barrette rigide de façon à ce qu'elle épouse les contours du nez et des pommettes



6. se désinfecter les mains après avoir mis le masque

Lunettes de protection ou visière

<p>Bien recouvrir les yeux avec les lunettes de protection et s'assurer qu'elles sont bien fixées derrière les oreilles</p>		<p>Bien recouvrir le visage avec la visière et ajuster la barrette pour qu'elle épouse le contour du visage</p>

Retrait du matériel de protection

1. Retirer les lunettes ou la visière
2. Retirer le masque
3. Eliminer le masque et les lunettes à usage unique dans le sac à déchets urbains après chaque utilisation.
4. Nettoyer et désinfecter les lunettes et les visières réutilisables et les stocker dans un endroit propre après chaque utilisation
5. Se désinfecter les mains après le retrait du masque et des lunettes

Précaution d'utilisation des masques médicaux

- L'utilisation du masque médical ne doit pas excéder **3 heures**
- Le masque doit être remplacé
 - s'il est humide
 - s'il est abîmé
 - s'il est contaminé par des liquides biologiques
- Il est à usage unique et ne doit en aucun cas être remis sur le visage une fois enlevé
- Il ne doit jamais se trouver autour du cou ou sur le front
- Son efficacité est diminuée en cas de barbe ou tout autre pilosité faciale empêchant le moulage parfait entre le visage et le bord du masque : les fuites se font par les bords du masque.
- Il peut être conservé par l'anesthésiste pour prendre successivement en charge plusieurs patients, dans les limites du temps d'efficacité, à condition de le laisser en place pendant la durée d'utilisation.
- Les boîtes de masques doivent être stockées à l'abri des projections, de l'humidité et de la poussière
- Les masques ne doivent pas être utilisés au-delà de la date de péremption inscrite sur la boîte

Lors de soins associés à un risque de projection de liquide biologique, le port de masque à visière ou masque + lunettes de protection doit être respecté



ou



et /ou



**Les lunettes médicales ne sont pas considérées
comme des lunettes de protection**