



FICHE TECHNIQUE II GANTS

Quel type de gant pour quelle activité

Activité (liste non exhaustive)	Type de gant
<ul style="list-style-type: none"> • Toute activité avec contact potentiel avec des liquides biologiques : <ul style="list-style-type: none"> - prélèvements sanguins (y compris glycémies capillaires) - injections - manipulation de matériel souillé avec des liquides biologiques - toilette intime - retrait de pansement souillé • Lésion des mains du professionnel 	<p>GANTS EN VINYLE (non poudrés) à usage unique ou éventuellement GANTS EN LATEX (non poudrés) à usage unique</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Autopsies (utilisation systématique de doubles gants) 	<p>GANTS DE PATHOLOGIE EN LATEX ("GANTS POST MORTEM") à usage unique (non poudrés) ou éventuellement GANTS EN NEOPRENE ou nitrile</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Evacuation des déchets • Nettoyage et désinfection d'appareils, de matériel de soins 	<p>GANTS SPECIAUX à usage multiple (gants de ménage, gants en kevlar, ...)</p>

Recommandations d'utilisation :

- ☞ Les gants doivent être mis juste avant le soin et enlevés juste après
- ☞ Un examen visuel des gants doit être effectué afin de détecter des éventuels trous
- ☞ Les mains doivent être propres et sèches avant d'enfiler les gants
- ☞ Le lavage ou la désinfection des gants de soins est à proscrire car ils altèrent la qualité de l'effet barrière et par conséquent l'étanchéité des gants

Comment retirer des gants

