

## Entretien du matériel d'assistance respiratoire

<b>Triflo et Inspirex</b>	<b>UU<sup>1</sup></b> = personnel au résident pendant la durée traitement
<b>Entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laver l'embout buccal après chaque utilisation avec de l'eau et du savon</li> <li>Bien rincer et sécher avec une compresse propre</li> <li>A jeter en fin de traitement</li> </ul>
<b>Remarque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protéger le matériel (ex. sachet plastique) entre deux utilisations à l'abri de la poussière,</li> </ul>
<b>Volumatic</b>	<b>UU<sup>1</sup></b> = personnel au résident pendant la durée traitement
<b>Entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laver l'embout buccal et le Volumatic après chaque traitement avec eau et savon</li> <li>Bien rincer et sécher avec une compresse propre</li> <li>A jeter en fin de traitement</li> </ul>
<b>Remarque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protéger le matériel entre deux utilisations à l'abri de la poussière, (ex. sachet plastique)</li> </ul>
<b>Oxygène</b>	Barboteur = <b>UM<sup>2</sup></b> Masque ou lunettes à oxygène et tubulure = <b>UU<sup>1</sup></b>
<b>Entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Changer</b> masque, lunettes, sonde, tubulure à la fin du traitement</li> <li>Inscrire la date lors de la 1<sup>ère</sup> utilisation de l'aquapack et le changer tous les 3 mois</li> </ul>
<b>Remarque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protéger le matériel entre deux utilisations à l'abri de la poussière, (ex. sachet plastique)</li> </ul>
<b>Contrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lors du soin contrôler la bonne arrivée d'oxygène</b></li> </ul>
<b>Nébulisateur</b>	nébulisateur = <b>UM<sup>2</sup></b>
<b>Entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laver le vaporisateur et le masque à l'eau et au savon après chaque utilisation, bien rincer et sécher avec une compresse</li> <li>Lors d'utilisation prolongée, <b>désinfecter</b> le vaporisateur et la tubulure par trempage <b>1 fois par semaine</b></li> <li>Désinfecter l'appareil, la tubulure et le vaporisateur par trempage ou prendre du matériel <b>UU</b> à la fin du traitement. Stocker l'appareil à l'abri de la poussière (housse)</li> <li>Utiliser de l'eau stérile en bouteille (à jeter après utilisation)</li> <li>Changer le filtre selon les indications du fabricant</li> </ul>
<b>Remarque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les nébulisateurs sont des dispositifs médicaux et de ce fait doivent faire l'objet d'une maintenance annuelle (ODim)</li> </ul>
<b>Humidificateur</b>	Humidificateur = <b>UM<sup>2</sup></b>
<b>Entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser et nettoyer soigneusement et régulièrement l'appareil selon les <u>indications du fabricant</u></li> <li>Nettoyer les réservoirs à eau et le fond des humidificateurs</li> <li>Toujours utiliser de l'eau fraîche et jeter l'eau qui reste après utilisation</li> </ul>
<b>Remarque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Privilégier les appareils fonctionnant par gazéification ou évaporation (moins de risque de diffusion de bactéries dans l'air)</li> <li>Vérifier le taux d'humidité du local (doit être comprise entre 30-50%)</li> <li>Aérer les locaux régulièrement surtout en période hivernale</li> </ul>

**UU<sup>1</sup>** = matériel à usage unique = utilisé pour un seul patient et jeter à la fin du traitement.

**UM<sup>2</sup>** = matériel à usage multiple = réutilisé pour plusieurs patients après avoir été désinfecté et selon le type de matériel stérilisé.