

Phases	Traitement manuel	Traitement automatique	Matériel de protection	
<pre> graph TD A[Pré désinfection] --> B[Test étanchéité] B --> C[Nettoyage] C --> D[Rinçage intermédiaire] D --> E[Désinfection] E --> F[Rinçage final] F --> G[Séchage] G --> H[Contrôles] H --> I[Stockage] I --> J[Traçabilité] </pre>	<p>Salle d'examen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Essuyage de la gaine externe de l'endoscope – Rinçage des canaux air/eau et opérateur – Déconnection de l'endoscope du processeur 		Gants, Surblouse	
	Transport de l'endoscope jusqu'au local de traitement dans un bac fermé Bac de transport désinfecté		Gants	
	Zone sale	<p>Selon les indications du fabricant de l'endoscope. Le testeur sera branché et débranché à l'extérieur du bain de nettoyage</p>		Gants, Surblouse Masque+lunettes ou visière
	Bac contenant solution détergente diluée (selon indications fournisseur) dans eau à T°C < 45°C :	<ul style="list-style-type: none"> – Nettoyage surface externe – Brossage des canaux et des valves et orifices – Rinçage des petits canaux 		Gants, Surblouse Masque +lunettes ou visière
	Solution de nettoyage éliminée après chaque phase de nettoyage Bac de nettoyage désinfecté et rangé après phase de nettoyage			
	Avec eau du robinet rinçage:	<ul style="list-style-type: none"> – Partie externe de l'endoscope (douchette) – Canaux (seringue à usage unique) 		Gants, Surblouse Masque +lunettes ou visière
	Eau de rinçage éliminée après la phase de rinçage bac utilisé désinfecté avant la phase de rinçage terminal			
	Bac avec sol. désinfectante (acide péracétique ou glutaraldéhyde) à une T°, %, temps de trempage tels que préconisés par le fournisseur du produit. La solution sera changée à un rythme préétabli (selon indications fabricant)		<p>Programmer le laveur-désinfecteur (LD) pour un cycle complet :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Test d'étanchéité 2. Nettoyage 3. Rinçage 4. Désinfection 5. Rinçage 6. Séchage 	Gants, Surblouse Masque + lunettes ou visière
	Avec eau stérile /distillée Partie externe endoscopes canaux		Produits et qualité eau compatibles avec le LD	Gants, Surblouse Masque + lunettes ou visière
	Zone propre :			
	Air comprimé médical ou alcool à 70°		Air comprimé médical ou alcool à 70° si non effectué par le LD	Gants à UU propres(colonoscope) stériles(bronchoscope)
	<ul style="list-style-type: none"> – Siccité – Absence de salissure – Fonctionnalité de l'endoscope 			Gants à UU propres(colonoscope) stériles(bronchoscope)
	A la verticale, dans des armoires propres, entretenues régulièrement			
	<ul style="list-style-type: none"> – Nom et prénom du patient - N°admission – Date et type d'examen endoscopique – N° de l'endoscope – Différentes phases de retraitement et produits utilisés – Date et signature du responsable du traitement – Date du stockage 			