

1. OBJET

Les piluliers électroniques doivent subir une désinfection chimique entre chaque patient afin de prévenir la transmission des agents infectieux.

Ce document a été élaboré en accord avec le fabricant AARDEX Ltd. à Zug

2. DOMAINE D'APPLICATION

Pharmacie

3. RESPONSABILITE

Pharmacien-ne et personne dédiée à cette tâche

4. DEROULEMENT

1. Enlever les étiquettes et nettoyer les résidus de colle et de taches (mélange 1 :1 benzine-alcool)
2. Mettre des gants et un tablier à usage unique
3. Immerger les bouchons et les flacons dans la solution désinfectante-détergente et brosser le pas de vis à l'aide de la brosse à dents. Laisser tremper dans la solution désinfectante-détergente pour la durée indiquée pour le produit utilisé
4. Enlever les gants et le tablier, désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique.

Avant de sortir les piluliers (bouchons et flacons)

5. Mettre des gants et un tablier à usage unique
6. Rincer soigneusement à l'eau du robinet les piluliers en insistant sur le pas de vis
7. Enlever les gants, le tablier et désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique
8. Laisser sécher les piluliers sur un linge propre, puis fixer la protection plastique sur le pas de vis
9. Faire le contrôle de fonctionnalité des piluliers
10. Mettre des gants à usage unique et désinfecter les bouchons à l'éthanol 70°
11. Enlever les gants et désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique.

5. VALIDATION

Date d'émission	Classement	Elaboration/Modification par	Vérification/Approbaton par
23.08.2007	Validation dans V/Doc	FB, SMPH; CP unité HPCI	GZ, SMPH; CP, unité HPCI

Ce document a été élaboré par le SMPH en collaboration avec l'unité HPCI, sous l'expertise du SMPH, CHUV.

L'unité HPCI et les cellules régionales HPCI recommandent ce document comme document de référence pour les différents établissements du canton Vaud