

Endoscopie- endoscopes souples- traitement logigramme

Phases	Traitement manuel	Traitement automatique	Matériel de protection	
Pré désinfection ↓ Test étanchéité ↓ Nettoyage ↓ Rinçage intermédiaire ↓ Désinfection ↓ Rinçage final ↓ Séchage ↓ Contrôles ↓ Stockage ↓ Traçabilité	Salle d'examen		Gants, Surblouse	
	– Essuyage de la gaine externe de l'endoscope – Rinçage des canaux air/eau et opérateur – Déconnection de l'endoscope du processeur			
	Transport de l'endoscope jusqu'au local de traitement dans un bac fermé Bac de transport désinfecté			
	Zone sale		Gants, Surblouse Masque+lunettes ou visière	
	Selon les indications du fabricant de l'endoscope. Le testeur sera branché et débranché à l'extérieur du bain de nettoyage			
	Bac contenant solution détergente diluée (selon indications fournisseur) dans eau à T°C < 45°C : – Nettoyage surface externe – Brossage des canaux et des valves et orifices – Rinçage des petits canaux		Gants, Surblouse Masque +lunettes ou visière	
	Solution de nettoyage éliminée après chaque phase de nettoyage Bac de nettoyage désinfecté et rangé après phase de nettoyage			
	Avec eau du robinet rinçage: – Partie externe de l'endoscope (douchette) – Canaux (seringue à usage unique)		Gants, Surblouse Masque +lunettes ou visière	
	Eau de rinçage éliminée après la phase de rinçage bac utilisé désinfecté avant la phase de rinçage terminal			
	Bac avec sol. désinfectante (acide péracétique ou glutaraldéhyde) à une T°, %, temps de trempage tels que préconisés par le fournisseur du produit. La solution sera changée à un rythme préétabli (selon indications fabricant)	Programmer le laveur-désinfecteur (LD) pour un cycle complet : 1. Test d'étanchéité 2. Nettoyage 3. Rinçage 4. Désinfection 5. Rinçage 6. Séchage Produits et qualité eau compatibles avec le LD		Gants, Surblouse Masque + lunettes ou visière
	Avec eau stérile /distillée Partie externe endoscopes canaux			Gants, Surblouse Masque + lunettes ou visière
	Zone propre :			Gants à UU propres (colonoscopes) stériles (bronchoscope)
	Air comprimé médical ou alcool à 70°	Air comprimé médical ou alcool à 70° si non effectué par le LD		
	– Siccité – Absence de salissure – Fonctionnalité de l'endoscope		Gants à UU propres (colonoscopes) stériles (bronchoscope)	
	A la verticale, dans des armoires propres, entretenues régulièrement			
	– Nom et prénom du patient - N° admission – Date et type d'examen endoscopique – N° de l'endoscope – Différentes phases de retraitement et produits utilisés – Date et signature du responsable du traitement – Date du stockage			