

Fiche technique

# Physiothérapie - traitement du nébulisateur à domicile

Dernière mise à jour

04/10/2016

## Etablissements concernés

CMS et soignants indépendants, Cabinets et  
polycliniques (Médical)

## Traitement après chaque utilisation

- ① Démontez le nébuliseur
- ② Lavez le nébuliseur pendant 5 minutes avec de l'eau chaude du robinet et un produit de vaisselle conventionnel afin d'éliminer toutes traces de médicaments et autres impuretés.
- ③ Rincer abondamment sous l'eau chaude et bien secouer pour raccourcir la phase de séchage.
- ④ Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
- ⑤ Laver ou désinfecter les mains.
- ⑥ Conserver le nébuliseur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
- ⑦ Changement du nébuliseur 1 x par année.

## Traitement une fois par semaine

- ① Nettoyer le nébuliseur dans le lave-vaisselle (corbeille à couverts) en choisissant un programme à minimum 50°.
- ② Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
- ③ Laver ou désinfecter les mains.
- ④ Conserver le nébuliseur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
- ⑤ Changement du nébuliseur 1 x par année.

## A défaut de lave-vaisselle

- ① Placer le nébuliseur démonté dans une casserole et couvrir avec de l'eau.
- ② Faire bouillir pendant 15 minutes.
- ③ Veiller à conserver un niveau d'eau suffisant dans la casserole.
- ④ Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
- ⑤ Laver ou désinfecter les mains.
- ⑥ Conserver le nébuliseur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
- ⑦ Changement du nébuliseur 1 x par année.