

Fiche technique

# Pré désinfection chimique des Dispositifs Médicaux

Dernière mise à jour

03/05/2017

## Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités), EMS, EPSM, ESE, CAT, CMS et soignants indépendants, Cabinets et polycliniques (Médical, Dialyse ambulatoire)

## Introduction

La prédésinfection des dispositifs médicaux utilisés et pouvant être retraités (indication du fabricant) est une étape indispensable permettant de réduire la charge microbienne initiale du matériel contaminé et protéger le personnel. La prédésinfection doit se faire dans les meilleurs délais après usage du dispositif médical (DM)

Cette activité doit être réalisée dans un local dédié à cette tâche.

## Moyens

Produits	<ul style="list-style-type: none"> <li> Produit détergent désinf</li> <li> Eau du réseau</li> </ul>
Equipement	<ul style="list-style-type: none"> <li> Bacs de trempage</li> <li> Lingettes propres imbibe</li> </ul>

Matériel de protection pour le personnel	 Gants de ménage  Lunettes de protection /  Tablier en plastique à us
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Méthode

- ① Contrôler ou préparer le bain de détergent désinfectant pour instruments selon les instructions du fabricant du produit (concentration, qualité de l'eau et fréquence de changement de la solution)
- ② Trier les dispositifs médicaux pouvant être immergés
- ③ Tremper les DM pendant le temps prédéfini (en fonction de la concentration du produit utilisé)
- ④ Rincer à l'eau courante du réseau
- ⑤ Ranger les DM dans la caisse de ramassage ad hoc
- ⑥ Nettoyer et désinfecter le bac de trempage lors du changement de la solution de prédésinfection :
  - vider le bac
  - rincer à l'eau du réseau
  - nettoyer avec chiffonnette propre si souillures visibles après rinçage