

Fiche technique

Echographie sur peau saine sans acte invasif associé : désinfection de bas niveau

Dernière mise à jour

19/05/2021

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités,
Endoscopie), Cabinets et polycliniques (Médical)

Objet

La désinfection de bas niveau des ondes d'échographie est réservée exclusivement aux sondes utilisées lors d'échographie percutanée sur peau saine sans acte invasif associé.

Matériel

-  Lingettes sèches absorbantes à usage unique
-  Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
-  Gants de soins non stériles à usage unique
-  Lingettes détergentes/désinfectantes compatibles avec les sondes d'échographie
-  Produit détergent-désinfectant de surface.

Précautions à prendre lors de l'examen/ entretien de l'appareil

Après chaque examen

-  Eliminer le gel de transmission en essuyant la sonde avec une lingette absorbante à usage unique
-  Se désinfecter les mains
-  Enfiler une paire de gants non stériles
-  Débrancher la sonde du pupitre (moniteur) de l'échographe
-  Nettoyer/désinfecter la sonde (importance de l'action mécanique) avec une lingette imprégnée de produit détergent/désinfectant compatibles avec des sondes d'échographie
-  Avec une deuxième lingette imprégnée de produit détergent/désinfectant compatible avec la sonde, nettoyer/désinfecter la poignée de la sonde, le câble et toutes les surfaces contaminées en cours d'examen, le porte-sonde inclus.
-  Retirer les gants et se désinfecter les mains

En fin de journée (1x/ jour)

-  Mettre le matériel hors tension et enfiler une paire de gants non stériles
-  Avec le produit détergent-désinfectant **de surface**, nettoyer/désinfecter :
 -  le clavier, le tableau de bord, le cordon de la sonde
 -  le support de sonde, l'interface utilisateur, l'affichage du moniteur
-  Retirer les gants, se désinfecter les mains.
-  Remplir la feuille de traçabilité

Entretien hebdomadaire (fixer un jour) :

-  Mettre le matériel hors tension et enfiler une paire de gants non stériles
-  Nettoyer/désinfecter la carrosserie de l'échographe avec le produit détergent-désinfectant **de surface**
-  Retirer les gants, se laver les mains à l'eau et savon
-  Remplir la feuille de traçabilité