

Fiche technique

Echographie endocavitaire (endovaginale/endorectale/autres sauf transoesophagienne) - Désinfection de haut niveau à l'aide des lingettes imprégnées de produit de haut pouvoir de désinfection y compris action anti-HPV

Dernière mise à jour

01/03/2021

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités,
 Endoscopie), Cabinets et polycliniques (Médical)

Objet

L'**usage des lingettes imprégnées de produit avec un haut pouvoir de désinfection y compris une action anti-HPV**, est une alternative possible pour le retraitement des sondes d'échographie endocavitaire autres que transoesophagiennes, ainsi que lors d'**examens où la sonde entre en contact avec des muqueuses ou du sang**, une fois la gaine de protection retirée et les résidus de gel et salissures nettoyées.

Matériel

-  Lingettes sèches absorbantes à usage unique
-  Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
-  Gants de soins non stériles à usage unique

 Lingettes imprégnées de produit avec un haut pouvoir de désinfection y compris anti-HPV ou produits prêts à l'emploi avec un haut pouvoir de désinfection y compris une action anti-HPV + lingettes spécifiques compatibles avec les sondes (mode d'emploi du fabricant à disposition).

 Produit détergent-désinfectant de surface

Déroulement du retraitement

 Débrancher la sonde du pupitre de l'échographe

 Retirer la gaine de protection soigneusement, en plaçant une lingette sèche à usage unique à la base de la gaine et en la poussant doucement pour éviter de contaminer la sonde, et l'éliminer dans les déchets urbains

 Eliminer le gel en essuyant la sonde avec une lingette sèche absorbante à usage unique

 Retirer les gants, se désinfecter les mains et mettre une nouvelle paire de gants non stériles

 Nettoyer/désinfecter la sonde avec une **lingette imprégnée de désinfectant de haut niveau**

 Nettoyer/désinfecter, avec une deuxième lingette **désinfectante imprégnée de désinfectant de haut niveau**: la poignée de la sonde, le câble et toute les surfaces contaminées en cours d'examen, inclus le porte-sonde.

 Retirer les gants et se désinfecter les mains