

Fiche technique

Désinfection de la carrosserie et du clavier lors d'échographie

Dernière mise à jour

01/03/2021

Etablissements concernés

Hôpitaux FHV, Cliniques, CTR (Toutes spécialités, Endoscopie), CMS et soignants indépendants, Cabinets et polycliniques (Médical, Dentaire, Dialyse ambulatoire)

Objet

La planification et réalisation du retraitement de la carrosserie et du clavier lors d'examen échographique concoure à la prévention de la transmission de germes et contribue à la longévité de cet équipement.

Matériel

-  Lingettes sèches absorbantes à usage unique
-  Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
-  Gants de soins non stériles à usage unique
-  Lingettes détergentes/désinfectantes compatibles avec les sondes d'échographie
-  Produit détergent-désinfectant de surface.

Retraitement de la carrosserie et du clavier de l'échographe

Après chaque examen

- Eliminer le gel de transmission en essuyant la sonde avec une lingette absorbante à usage unique
- Se désinfecter les mains
- Mettre une paire de gants non stériles
- Débrancher la sonde du pupitre (moniteur) de l'échographe
- Nettoyer/désinfecter la sonde (importance de l'action mécanique) avec une lingette imprégnée de produit détergent/désinfectant.
- Avec une deuxième lingette imprégnée de produit détergent/désinfectant compatible avec la sonde, nettoyer/désinfecter la poignée de la sonde, le câble et toute les surfaces contaminées en cours d'examen, le porte-sonde inclus.
- Retirer les gants et se désinfecter les mains

En fin de journée (1x/ jour)

- Mettre le matériel hors tension et enfiler une paire de gants non stériles
- Avec le produit détergent-désinfectant **de surface**, nettoyer/désinfecter :
 - le clavier, le tableau de bord, le cordon de la sonde
 - le support de sonde, l'interface utilisateur, l'affichage du moniteur
- Retirer les gants, se désinfecter les mains.
- Remplir la feuille de traçabilité

Entretien hebdomadaire (fixer un jour) :

- Mettre le matériel hors tension et enfiler une paire de gants non stériles
- Nettoyer/désinfecter la carrosserie de l'échographe avec le produit détergent-désinfectant **de surface**
- Retirer les gants, se laver les mains à l'eau et savon
- Remplir la feuille de traçabilité