

## TRAITEMENT DU MATÉRIEL À USAGE MULTIPLE IMMERGEABLE

### PRISE EN CHARGE DU MATÉRIEL À STÉRILISER OU À DÉSINFECTER PAR IMMERSION

	<b>Matériel immergeable à stériliser</b>	<b>Traitement du matériel immergeable à désinfecter</b>
<b>Immersion du matériel dans la solution désinfectante</b>	<p><b>Mettre des gants</b> à usage unique ou des gants de ménage individuels</p> <p><b>Démonter</b>, si nécessaire, le matériel, ouvrir pinces et ciseaux et les immerger totalement dans le bain</p> <p><b>Vider</b> les cupules dans le vidoir du local sale avant immersion</p> <p>Enlever les gants et se désinfecter les mains</p> <p><b>Respecter le temps d'immersion</b> compte tenu de la concentration du bain en produit désinfectant et selon information du fabricant</p>	<p><b>Mettre des gants</b> à usage unique ou des gants de ménage individuels</p> <p><b>Démonter</b>, si nécessaire, le matériel, ouvrir pinces et ciseaux et les immerger totalement dans le bain</p> <p><b>Vider</b> les cupules dans le vidoir du local sale avant immersion</p> <p>Enlever les gants et se désinfecter les mains</p> <p><b>Respecter le temps d'immersion</b> compte tenu de la concentration du bain en produit désinfectant et selon information du fabricant</p>
<b>Nettoyage manuel du matériel dans le bain de désinfection</b>		<p>Mettre des <b>gants de ménage individuels</b></p> <p><b>Effectuer un nettoyage mécanique</b> du matériel dans le bain de désinfection au moyen d'un chiffon doux (à changer quotidiennement)</p> <p><b>Sortir le matériel</b> du bain de désinfection</p>
<b>Rinçage manuel du matériel</b>	<p><b>Mettre des gants de ménage individuels</b></p> <p><b>Rincer le matériel abondamment à l'eau courante</b>, ce qui permet d'éliminer toute trace de produit, ainsi que les résidus organiques</p> <p><b>Le déposer</b> dans la caisse prévue à cet effet</p> <p>Enlever les gants et <b>se désinfecter les mains</b></p>	<p><b>Rincer le matériel abondamment à l'eau courante</b>, ce qui permet d'éliminer toute trace de produit, ainsi que les résidus organiques</p> <p>Enlever les gants et <b>se désinfecter les mains</b></p>
<b>Séchage manuel du matériel</b>		<p><b>Sécher</b> le matériel à l'aide d'un chiffon sec, lisse et non pelucheux</p>

<b>Emballage</b>		Pour le matériel <b>non stérilisé en contact indirect avec les muqueuses</b> ex : matériel de physiothérapie respiratoire  Protéger le matériel au moyen d'un sachet plastique, si nécessaire
------------------	--	---

**Les désinfectants étant potentiellement toxiques, il est important que les personnes qui les manipulent évitent tout contact avec la peau et les muqueuses en mettant systématiquement des gants de ménage individuels. S'il y a un risque de projections, porter également une blouse de protection, des lunettes de protection et un masque**

**PIÈCE(S) JOINTE(S):**

Dernière mise à jour le 17/10/2016