

## ENTRETIEN DES APPAREILS À AÉROSOL

Cette fiche technique s'adresse à l'entretien des appareils à aérosol Pari Boy S® / Pari Boy SX® et leurs accessoires afin d'en assurer la propreté et éviter la propagation des germes

### DÉROULEMENT

#### Filtre

- Le filtre situé dans la plaque avant du compresseur doit être remplacé au bout de 200 heures d'utilisation ou au moins 1 fois par an
- Selon les recommandations du fabricant
  - Vérifier le filtre régulièrement (après 10 à 12 inhalations).
  - Remplacer le filtre s'il est encrassé (grisâtre ou brunâtre) bouché ou humide
- Pour changer le filtre
  - Dévisser, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le support du filtre en utilisant un dispositif de la taille d'une pièce de monnaie
  - Retirer l'ancien filtre du support et insérer le nouveau
  - Introduire le support avec le nouveau filtre dans le compresseur et le revisser dans le sens des aiguilles d'une montre en utilisant un dispositif de la taille d'une pièce de monnaie

#### Raccord entre l'appareil et la tubulure

- Le raccord est à jeter à la fin du traitement du patient (patient unique), le circuit de désinfection par trempage étant supprimé au DP

#### Tubulure et masque

- A conserver durant le séjour du patient. A changer 1x/semaine (patient unique)
- A changer si matériel abimé
- A laver avec eau chaude et savon, puis sécher entre les utilisations et ranger sur une surface propre
- A jeter en fin de traitement (déchets urbains)

#### Le compresseur

- Débrancher le compresseur avant chaque nettoyage et débrancher le câble secteur de la prise
- Essuyer la surface extérieure du boîtier du compresseur avec un chiffon humide (lingette désinfectante)



### DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

- Notice d'utilisation - Pari Boy S® / Pari Boy SX®
- Ordonnance sur les dispositifs médicaux. 812.213
- Notice d'utilisation - Pari Boy S®/Pari Boy SX®. P 81

**PIÈCE(S) JOINTE(S):**

---

Dernière mise à jour le 29/10/2016