

PHYSIOTHÉRAPIE - TRAITEMENT DU NÉBULISATEUR À DOMICILE

TRAITEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION

1. Démonter le nébuliseur
2. Laver le nébuliseur pendant 5 minutes avec de l'eau chaude du robinet et un produit de vaisselle conventionnel afin d'éliminer toutes traces de médicaments et autres impuretés.
3. Rincer abondamment sous l'eau chaude et bien secouer pour raccourcir la phase de séchage.
4. Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
5. Laver ou désinfecter les mains.
6. Conserver le nébuliseur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
7. Changement du nébuliseur 1 x par année.

TRAITEMENT UNE FOIS PAR SEMAINE

1. Nettoyer le nébuliseur dans le lave-vaisselle (corbeille à couverts) en choisissant un programme à minimum 50°.
2. Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
3. Laver ou désinfecter les mains.
4. Conserver le nébuliseur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
5. Changement du nébuliseur 1 x par année.

A défaut de lave-vaisselle

1. Placer le nébuliseur démonté dans une casserole et couvrir avec de l'eau.
2. Faire bouillir pendant 15 minutes.
3. Veiller à conserver un niveau d'eau suffisant dans la casserole.
4. Sécher avec du papier de ménage à usage unique (évt. rouleau conservé dans un endroit propre).
5. Laver ou désinfecter les mains.
6. Conserver le nébuliseur dans un tissu ou une serviette propre (qui ne peluche pas) à l'abri de toute poussière.
7. Changement du nébuliseur 1 x par année.

PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [HPCI W_FT_00154.pdf \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00154.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00154.pdf)

Dernière mise à jour le 04/10/2016