

## SOINS À DOMICILE - G-LIFT - RETRAITEMENT

Le G-Lift est un dispositif médical utilisé pour retirer une aiguille (par exemple Gripper ou aiguille Huber) d'un système de cathéter complètement implanté type Porth-à-Cath tout en permettant de diminuer le risque d'accident par piqûre. Le G-Lift est à classer dans les dispositifs médicaux semi critiques selon la classification de Spaulding (Précautions Standard 5) puisqu'il rentre en contact avec la peau pouvant être superficiellement lésée. Le retraitement requis après utilisation est une désinfection/nettoyage de niveau intermédiaire. Ce traitement permet entre autre l'élimination des bactéries de la peau (*Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Corynebacterium spp*, etc ), de la plupart des virus (VIH, virus de l'hépatite B, virus de l'herpès Simplex) et des champignons (*Candida spp*) à l'exception des spores bactériens .Il faut rappeler que ce dispositif sécurisé n'est pas sans risque de blessure en raison :

- de la difficulté à glisser le G-LIFT sous le dispositif du Gripper,
- du risque de rebond au moment du retrait de l'aiguille de Gripper
- du risque de déformer l'aiguille de HUBER.

## PRISE EN CHARGE DU G-LIFT AU DOMICILE

### Etape 1

Eliminer l'aiguille dans un container sécurisé (sharp safe) immédiatement après son retrait

### Etape 2

Retraitement du G-LIFT :

1. En présence de souillures avec des liquides biologiques, essuyer le G-LIFT avec une compresse humide.
2. Mettre le G-LIFT dans sa boîte (emballage rigide) jusqu'à sa prise en charge au CMS.

## PRISE EN CHARGE DU G-LIFT AU CMS

### Phase de pré-désinfection

1. Mettre des gants et tremper le G-LIFT dans une solution de pré-désinfection exempte d'aldéhydes, durée de trempage définie par le produit utilisé

### Phase de désinfection

1. Mettre des gants, des lunettes de protection, une surblouse (tablier plastique)
2. Rincer le G-Lift avec de l'eau du robinet
3. Désinfecter et nettoyer manuellement le G-Lift et sa boîte avec le produit désinfectant/détergent habituellement utilisé
4. Rincer le G-LIFT et sa boîte avec de l'eau du robinet
5. Bien sécher avec un tissu non pelucheux
6. Vérifier la propreté, la fonctionnalité du G-Lift et de sa boîte
7. Conditionner le G-LIFT dans sa boîte
8. Etiqueter la boîte : indiquer le type de traitement, la date, le code identifiant du collaborateur

## UTILISATION DU G-LIFT

Avant utilisation du G-LIFT, désinfecter à l'alcool 70° la surface entrant en contact avec la peau du patient

### PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [HPCI\\_W\\_FT\\_00211.pdf \(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI\\_W\\_FT\\_00211.pdf\)](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00211.pdf)

Dernière mise à jour le 04/10/2016