

## PILULIER ÉLECTRONIQUE TYPE MEMS: DÉSINFECTION ET ENTRETIEN

Les piluliers électroniques doivent subir une désinfection chimique entre chaque patient afin de prévenir la transmission des agents infectieux. Ce document a été élaboré en accord avec le fabricant AARDEX Ltd. à Zug.

### RESPONSABILITÉ

Pharmacien-ne et personne dédiée à cette tâche

### DÉROULEMENT

1. Enlever les étiquettes et nettoyer les résidus de colle et de taches (mélange 1 :1 benzine-alcool)
2. Mettre des gants et un tablier à usage unique
3. Immerger les bouchons et les flacons dans la solution désinfectante-détergente et brosser le pas de vis à l'aide de la brosse à dents.
4. Laisser tremper dans la solution désinfectante- détergente pour la durée indiquée pour le produit utilisé
5. Enlever les gants et le tablier
6. Désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique.

Avant de sortir les piluliers (bouchons et flacons)

1. Mettre des gants et un tablier à usage unique
2. Rincer soigneusement à l'eau du robinet les piluliers en insistant sur le pas de vis
3. Enlever les gants, le tablier
4. Désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique
5. Laisser sécher les piluliers sur un linge propre, puis fixer la protection plastique sur le pas de vis
6. Faire le contrôle de fonctionnalité des piluliers
7. Mettre des gants à usage unique et désinfecter les bouchons à l'éthanol 70°
8. Enlever les gants et désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique.

### PIÈCE(S) JOINTE(S):

Dernière mise à jour le 21/02/2017