

ENTRETIEN DES ÉTHYLOMÈTRES LION 500

Cette fiche technique s'applique lors de l'entretien des appareils alcometer® Lion 500. Elle est en vigueur dans tous les services du département de psychiatrie utilisant ce type d'équipement. Le contrôle de son application est de la responsabilité de l'ICUS et de l'ICS de chaque service concerné.

DÉROULEMENT

Embout

- Toujours utiliser un nouvel embout pour chaque nouveau test, même pour un même patient
- Ne pas manipuler l'ouverture de l'embout avec les doigts

Introduisez l'embout comme suit :



Ouvrir à la sortie d'air



Introduire l'embout en appuyant au centre



Enlever le film plastique de l'ouverture du soufflage

Veillez à toujours utiliser un nouvel embout pour chaque nouveau test !

Boîtier

- La personne testée ne doit pas toucher le boîtier, ce qui pourrait empêcher le soignant de voir l'écran
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon **légèrement** humide et du produit à vaisselle en cas de souillure
- Ne jamais employer de produits chimiques, de la poudre à récurer ou trop d'eau : cela pourrait endommager le boîtier et les capteurs internes
- Ne pas utiliser de produits à base d'alcool (pas de lingettes désinfectantes)

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Labtec services. Mode d'emploi utilisateur Lion alcolmeter ® 500 B. 2014
- Labtec services. Mode d'emploi Lion alcolmeter® 500. 2005

PIÈCE(S) JOINTE(S):

Dernière mise à jour le 29/10/2016