

PRÉ DÉSINFECTION CHIMIQUE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

INTRODUCTION

La prédésinfection des dispositifs médicaux utilisés et pouvant être retraités (indication du fabricant) est une étape indispensable permettant de réduire la charge microbienne initiale du matériel contaminé et protéger le personnel. La prédésinfection doit se faire dans les meilleurs délais après usage du dispositif médical (DM)
Cette activité doit être réalisée dans un local dédié à cette tâche.


MOYENS

Produits	<ul style="list-style-type: none">• Produit détergent désinfectant adapté aux DM traités• Eau du réseau
Equipement	<ul style="list-style-type: none">• Bacs de trempage• Lingettes propres imbibables, linge,
Matériel de protection pour le personnel	<ul style="list-style-type: none">• Gants de ménage• Lunettes de protection / masque à visière• Tablier en plastique à usage unique

MÉTHODE

1. Contrôler ou préparer le bain de détergent désinfectant pour instruments selon les instructions du fabricant du produit (concentration, qualité de l'eau et fréquence de changement de la solution)
2. Trier les dispositifs médicaux pouvant être immergés
3. Tremper les DM pendant le temps prédéfini (en fonction de la concentration du produit utilisé)
4. Rincer à l'eau courante du réseau
5. Ranger les DM dans la caisse de ramassage ad hoc
6. Nettoyer et désinfecter le bac de trempage lors du changement de la solution de prédésinfection : -
 - vider le bac
 - rincer à l'eau du réseau
 - nettoyer avec chiffonnette propre si souillures visibles après rinçage

PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [Changement de la solution de pré désinfection](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00220.doc)
(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00220.doc)

Dernière mise à jour le 03/05/2017