

NETTOYAGE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN LAVEUR DÉSINFECTEUR

OBJET

Le nettoyage physico-chimique est réservé aux Dispositifs Médicaux (DM) pouvant être traités en laveur désinfecteur (selon les indications du fabricant)

DOMAINE D'APPLICATION

Service de stérilisation

DÉFINITION

Le nettoyage des DM est une des étapes essentielles permettant de garantir le succès de l'opération de stérilisation.

Le nettoyage en laveur désinfecteur des DM permet d'éliminer les salissures par l'action physico chimique d'un produit tel un détergent conjugué au pouvoir physique germicide réalisé par l'action de la chaleur humide à températures supérieures à 65°C.

RESPONSABILITÉS

L'ensemble du personnel du service de stérilisation

DÉROULEMENT


Le lavage en laveur désinfecteur des dispositifs est fait soit directement après l'utilisation, soit suite à l'opération de pré désinfection.


MÉTHODE

1. Vérifier que tous les DM sont complètement démontés et/ou ouverts
2. Répartir les DM sur le support de charge adapté (élément qui entre dans le LD tel support pour instruments chirurgicaux, conteneurs, sabots, matériel d'anesthésie, matériel d'endoscopie, etc), selon la charge de référence définie lors de la validation du laveur désinfecteur
3. Remplir le formulaire FT0231 : Liste de chargement des DM dans le laveur désinfecteur
4. Sélectionner le programme adapté, suivant le type de charge
5. Enclencher l'appareil
6. Contrôler la conformité du déroulement du cycle
7. Sortir le matériel
8. Contrôler le séchage et le compléter si nécessaire à l'aide de :
 - air médical comprimé
 - linge propre, non pelucheux

Une fois séché, le DM sera acheminé en zone de conditionnement

PIÈCE(S) JOINTE(S):

 [Liste de chargement des DM dans le laveur désinfecteur](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00223%281.0%29.doc)
(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00223%281.0%29.doc)

 [Contrôle de l'efficacité du nettoyage des DM en laveur désinfecteur](https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00224%281.0%29.doc)
(https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/prevention/HPCI_W_FT_00224%281.0%29.doc)

Dernière mise à jour le 04/11/2016