

Traitement des endoscopes souples dans les laveurs-désinfecteurs Wassenburg WD440

Responsabilités

Service concerné : Centre d'endoscopie

Fonctions concernées : ICS, ICUS du Centre d'endoscopie et
Personnel de la salle d'endoscopie

Objet

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document de référence.

Marche à suivre

1. Réception des endoscopes en zone sale

Les endoscopes sales arrivent dans les bacs fermés par un plastique rouge avec l'inscription « contaminated ».



Mettre le matériel de protection :

- Masque
- Bonnet et cheveux attachés sous le bonnet
- Lunettes ou masque avec protection faciale
- Sur-blouse de travail imperméable
- Gants à manches longues



2. Préparation de l'endoscope

Enlever la protection plastique du bac.
Débrancher les boutons et caoutchoucs aux extrémités de l'endoscope.



Mettre l'endoscope sous pression :

- Connecter le canal prévu pour le test d'étanchéité
- Allumer la pompe
- Placer l'endoscope dans le bac contenant la solution détergente-désinfectante.



3. Contrôle d'étanchéité de l'endoscope

Actionner les poignées de commande pour déceler d'éventuelles fuites.


Si aucune fuite n'est visible :

- Sortir de l'eau le connecteur (endroit où le raccord du test d'étanchéité est branché sur l'endoscope)
- Débrancher le raccord sur l'endoscope
- Débrancher le raccord sur la pompe
- Arrêter la pompe et faire sortir l'air de l'endoscope

pas de photo

4. Pré-lavage de l'endoscope

Brosser avec un écouvillon les valves, les bouchons et les embouts, puis les mettre dans le panier ad hoc.

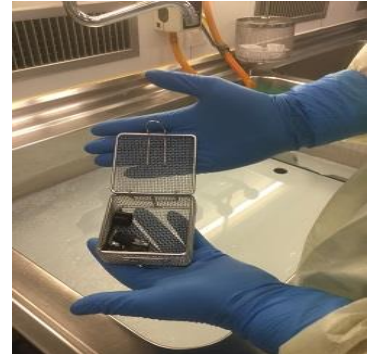

Brosser les canaux selon les instructions du fournisseur.
Laver l'extérieur de l'endoscope (tube d'insertion, poignées de commande...) avec l'éponge dédiée.





Une fois le pré-lavage terminé, placer l'endoscope dans le bac intermédiaire et rincer l'endoscope avec l'eau du robinet pour enlever un maximum de la solution détergente-désinfectante.




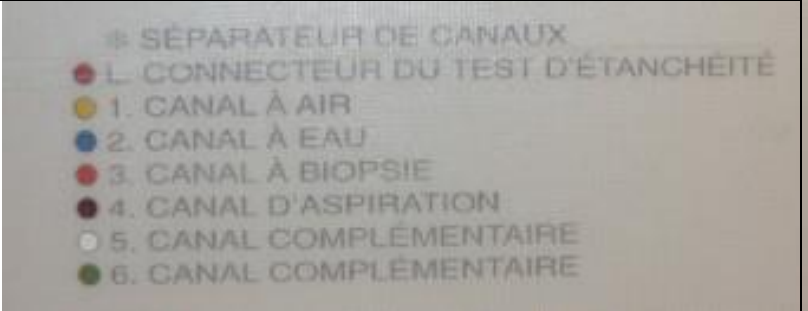
Pour les endoscopes PENTAX, mettre la protection au niveau du doigt de lumière

5. Transport de l'endoscope dans le laveur-désinfecteur

Chargement de la cuve de gauche	Chargement de la cuve de droite
<p><u>Main gauche</u> : poignée de commande et connecteur</p> <p><u>Main droite</u> : tube d'insertion</p>	<p><u>Main gauche</u> : tube d'insertion</p> <p><u>Main droite</u> : poignée de commande et connecteur</p>
	

6. Branchement de l'endoscope dans le laveur-désinfecteur

<p>Introduire le tube d'insertion dans le tube hélicoïdal</p> <p>Positionner l'endoscope afin de réduire les points de contacts.</p>	
--	---

Mettre les connexions en respectant l'ordre indiqué sur la machine :	
<ul style="list-style-type: none"> * Séparateur de canal Rouge Test d'étanchéité Jaune Air Bleu Eau Orange Biopsie Marron Aspiration Blanc Canal supplémentaire 1 Vert Canal supplémentaire 2 <p>Raccorder une connexion à la fois</p>	

Connecter le raccord dans la machine en vous référant au code couleur.







Connecter ensuite le raccord à l'endoscope en se référant au schéma sur la machine.






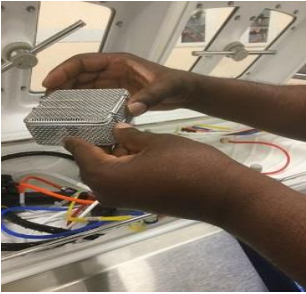


Une fois que le tube du test d'étanchéité, les canaux et le séparateur de canal sont connectés, placer le panier avec les valves, les bouchons et les embouts dans la cuve.





7. Démarrage du cycle en laveur-désinfecteur

<p>Enlever les gants de protection.</p> <p>Se désinfecter les mains à l'aide de la solution hydro-alcoolique.</p>	
<p>Lancement du programme de lavage et de désinfection</p> <p>Dans le menu « Tableau de bord » appuyé sur le bouton « PROGRAMME NORMAL », appuyer sur « CHARGER » pour lancer la procédure de chargement</p> <p>Ensuite, appuyer sur « OUTILS », « EVENEMENTS » « PROGRAMME NORMAL », remplir :</p>	
<p>Entrer le numéro d'utilisateur à l'aide du lecteur code barre (si pas de code barre, appuyer sur « CHARGER », entrer le numéro, appuyer sur « DEMARRER »).</p>	
<p>Entrer le numéro de l'endoscope à l'aide du lecteur code barre (si pas de code barre, appuyer sur « CHARGER », entrer le numéro, appuyer sur le clavier « DEMARRER »).</p>	
<p>Entrer le numéro de séjour du patient à l'aide du lecteur code barre (si pas de code barre, appuyer sur « CHARGER », entrer le numéro, appuyer sur « DEMARRER »).</p> <p>Appuyer sur les deux boutons latéraux pour fermer la porte, le cycle commence automatiquement.</p>	

8. Sortir l'endoscope du laveur-désinfecteur

<p>Appuyer sur « Cycle avec succès »</p> <p>Entrer le numéro d'utilisateur à l'aide du code barre</p> <p>Appuyer « couvercle prêt à s'ouvrir ».</p>	
<p>Pour l'ouverture de la porte, appuyer sous la porte de la machine avec le pied.</p>	
<p>Se désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique avant de manipuler l'endoscope désinfecté.</p>	
<p>Prendre le panier avec les valves, bouchons et embouts.</p>	
<p>En renversant le panier, mettre les valves, bouchons et embouts dans le bac de transport.</p>	
<p>Déconnecter tous les canaux et mettre les extrémités des connections à l'extérieur de la cuve.</p>	

Cuve de gauche	Cuve de droite
<p><u>Main gauche</u> : poignée de commande et connecteur</p> <p><u>Main droite</u> : tube d'insertion</p>	<p><u>Main gauche</u> : tube d'insertion</p> <p><u>Main droite</u> : poignée de commande et connecteur</p>
<p>Sortir l'endoscope de la cuve et le placer dans le bac de transport :</p> 	
<p>Amener le bac de transport au niveau des rouleaux de transports pour le passage côté propre.</p>	

Références

- Document adapté du mode d'emploi de la machine
- Photographie : SMPH