

Chargement et déchargement des endoscopes souples dans les armoire de stockage / séchage Dry 300 (ASP, Johnson & Johnson)

Responsabilités

Service concerné : Centre d'endoscopie




Fonctions concernées : ICS, ICUS du Centre d'endoscopie et
Personnel de la salle d'endoscopie




Objet

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document de référence.

Marche à suivre

1. Chargement d'un endoscope dans l'armoire

<p>Effectuer une désinfection des mains, avant de prendre l'endoscope dans le bac de transport</p>	
<p>Saisir l'endoscope : 1 main saisit l'extrémité de la partie d'insertion 1 main saisit la poignée de contrôle</p>	
<p>Sélectionner le numéro de la position dans l'armoire en appuyant sur l'écran tactile</p>	

<p>Appuyer sur « CHARGER » à la référence voulue</p>	
<p>Ouvrir la porte en appuyant aux 2/3 supérieurs de l'armoire</p>	
<p>Positionner l'endoscope sur le support</p>	
<p>Brancher le connecteur à chaque canal</p>	
<p>Mettre les valves, boutons et embouts dans le bac intégré au support</p>	
<p>Fermer les portes de l'armoire</p> <p>ATTENTION : si les lumières dans l'armoire ne sont pas éteintes, les portes ne sont pas correctement fermées</p>	

ATTENTION

Vérifiez qu'aucun tuyau ne soit pincé

Voir instruction page suivante si tuyau pincé



Manipulation si un tuyau de connexion est pincé

ATTENTION :

Les manipulations dans cette partie ne doivent JAMAIS être utilisées pour le chargement ou le déchargement d'un endoscope. Elles peuvent être utilisées uniquement si un tuyau de connexion est pincé, si une connexion est débranchée ou si les valves, bouchons ou embouts ne sont pas dans le rangement intégré au support.

- Appuyer sur la fonction « MENU »
- Appuyer sur la fonction « COMMANDE »
- Appuyer sur la fonction « OUVRIR / FERMER PORTE »







- Ouvrir la porte
- Repositionner les tuyaux des connexions, mettre les valves dans le support, rebrancher une connexion.
- Fermer les portes de l'armoire (ATTENTION : si les lumières dans l'armoire ne sont pas éteintes, les portes ne sont pas correctement fermées)

- Appuyer sur « MENU »
- Appuyer sur « ETAT »

2. Déchargement d'un endoscope de l'armoire

Avant d'entrer dans la salle de stockage, se désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique à l'extérieur de la salle



<p>Préparer un bac de transport Film transparent dans le fond Film d'indication de l'état de l'endoscope (propre ou contaminé)</p>	
<p>Choisir la position de l'endoscope à décharger Appuyer sur « DECHARGER » à la référence correspondante Ouvrir les portes et se désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique avant de saisir l'endoscope</p>	
<p>Débrancher l'ensemble des connexions de l'endoscope</p>	
<p>Saisir l'endoscope déconnecté 1 main saisit l'extrémité de la partie d'insertion 1 main saisit la poignée de contrôle</p>	
<p>Positionner l'endoscope dans le bac Mettre les valves, bouchons et embouts dans le bac</p>	
<p>Fermer les portes de l'armoire (ATTENTION : si les lumières dans l'armoire ne sont pas éteintes, les portes ne sont pas correctement fermées)</p>	

3. Préparation d'un endoscope avant examen

<p>Enduire les joints des valves de silicone Positionner les valves sur l'endoscope</p>		
<p>Reconnecter les bouchons Positionner les bouchons sur l'endoscope</p>		
<p>Une fois que toutes les valves, bouchons et embouts sont repositionnés sur l'endoscope, mettre le plastique de protection</p>		
<p>Recouvrir le bac d'un plastique vert avec l'inscription « CLEAN SCOPE » visible.</p>		

Après ces étapes, l'endoscope est prêt et peut être amené en salle d'examen.

Références

- Document adapté du mode d'emploi de la machine
- Photographie : SMPH