

## Réalisation d'un cycle d'auto-désinfection thermique dans le laveur-désinfecteur (LD) WD440 (Wassenburg)

### Responsabilités

Service concerné : Centre d'endoscopie

Fonctions concernées : ICS, ICUS du Centre d'endoscopie et  
Personnel de la salle d'endoscopie





### Objet

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.  
Le manuel d'utilisation reste le seul document de référence.

### Marche à suivre

Une auto-désinfection thermique du laveur-désinfecteur doit être effectuée 1x par semaine (effectuer un cycle d'auto-désinfection également après une immobilisation de 24 heures et après une réparation).

### 1. Préparation de la cuve

|   |   |
|---|---|
| <p>Cuve à la fin d'un cycle de désinfection.</p>  |   |
| <p>Enlever toutes les tubes de canal de la machine.</p>   |  |
| <p>Mettre la valve de rétention d'eau au niveau du 1<sup>ème</sup> canal.</p>                   |  |
| <p>Placer le bouchon du test d'étanchéité sur le tube du test d'étanchéité dans la chambre.</p> |  |

## 2. Nettoyage de la cuve

Utiliser l'alcool à 70 % pour désinfecter l'intérieur de la cuve.



Désinfecter l'intérieur de la cuve et l'intérieur du couvercle.



## 3. Changement des branchements

Changer la connexion du filtre de A à B en clipant l'embout.



## 4. Cycle de désinfection thermique


Fermer la cuve où le cycle aura lieu, en appuyant sur les boutons sous le panneau d'affichage.







Appuyer sur « Tableau de bord » sélectionner l'onglet « OUTILS ».  
Sélectionner: « Auto-désinfection Thermique » et appuyer sur OK.

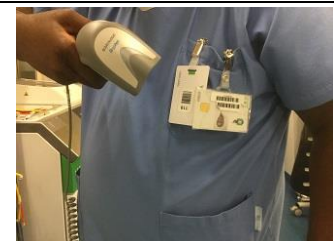

Sur l'écran, on demande d'entrer le numéro d'utilisateur à l'aide du lecteur code barre (si pas de code barre, appuyer sur « Démarrer », entrer le numéro, appuyer sur « Démarrer »).



|   |   |
|---|---|
| <p><b>A la fin du cycle</b></p> <p>Sur l'écran apparaît « CYCLE TERMINE AVEC SUCCES », appuyer et ensuite entrer le numéro d'utilisateur à l'aide du code barre</p> <p>Ensuite,<br/>Choisir le menu « OUTILS »<br/>Choisir la fonction « REMPLISSAGE »<br/>Choisir « EAU NON- FILTREE » et appuyer sur le bouton « DEMARRAGE ».<br/>Une fois le remplissage terminé, appuyer sur « EVACUATION ».</p> <p>Appuyer sur « TABLEAU DE BORD » pour reprendre le programme normal.</p> |    |
| <p>Pour l'ouverture du couvercle, appuyer sous la porte de la machine avec le pied.<br/>Retirer le bouchon de test d'étanchéité dans la chambre et le placer à l'endroit réservé à l'intérieur du laveur.</p> <p>Changer la connexion de la position B à la position A</p> <p>Remettre le tube de test d'étanchéité dans la chambre une fois que l'auto-désinfection thermique est terminée.</p>  | <br> |
| <p><b>Remplir la fiche de traçabilité du filtre</b></p> <p>Après le cycle, faire une coche sur le filtre pour numéroté le cycle réalisé (lorsque toutes les cases sont cochées, changer de filtre).</p>   |    |

**5. Refroidissement de la cuve (nécessaire si la cuve et le couvercle sont encore chauds et si un endoscope doit être désinfecté immédiatement dans la machine), ouvrir les portes du laveur-désinfecteur**

**Références**

- Document adapté du mode d'emploi de la machine WD440
- Photographie : SMPH