

Changement des bidons dans les laveurs-désinfecteurs (LD) WD440

Responsabilités

Service concerné : Centre d'endoscopie

Fonctions concernées : ICS, ICUS du Centre d'endoscopie et
Personnel de la salle d'endoscopie

Objet

Ceci est un protocole simplifié pour l'utilisation de la machine.
Le manuel d'utilisation reste le seul document de référence.




Marche à suivre

1. Changement du bidon de détergent (Wassenburg® medical)

Le changement du bidon se fait au moment où le laveur-désinfecteur génère un message d'avertissement. Le remplissage est interdit.

Avant de changer le bidon de détergent, mettre tous les éléments de protection :

- Blouse de protection plastifiée à longues manches
- Gants de ménage en nitrile à manches longues
- Lunettes de protection
- Masque chirurgical

<p>1. Le bidon de détergent est sur la droite (tube d'aspiration-doseur en plastique gris) Bidon blanc</p>	
<p>2. Enlever l'opercule métallique et ouvrir le nouveau bidon</p>	
<p>3. Passer le tube d'aspiration-doseur du bidon vide au nouveau bidon</p> <p>4. Repositionner le nouveau bidon dans la machine</p>	

2. Changement du bidon de désinfectant (Wassenburg® ENDO High PAA)

Le changement du bidon se fait au moment où le laveur-désinfecteur génère un message d'avertissement. Le remplissage est interdit.

Avant de changer le bidon de désinfectant mettre tous les éléments de protection :

- Blouse de protection plastifiée à longues manches
- Gants de ménage en nitrile à manches longues
- Lunettes de protection ou écran de protection pour les yeux
- **Masque contre les vapeurs acides**

1. Le bidon de désinfectant est sur la gauche
Bidon bleu



2. Enlever l'opercule métallique et ouvrir le nouveau bidon
3. Passer le doseur du bidon vide au nouveau bidon
4. Repositionner le nouveau bidon dans la machine



Références

- Document adapté du mode d'emploi de la machine WD440
- Photographie : SMPH