




## Désinfection et nettoyage du matériel de soins immergeable

Gestion du bain de désinfection à base de <b>Deconex® INSTRUMENT PLUS</b>	Traitement du matériel	Prévention pour le personnel
<p><b>Deconex® INSTRUMENT PLUS</b>, produit détergent désinfectant pour le matériel immergeable.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>(1) <b>PREPARATION DU BAIN</b> (2)</p> <p><b>Si pompe doseuse</b> Remplir le bac avec la solution diluée de Deconex® (1) prête à l'emploi</p> <p><b>Si pas de pompe doseuse</b> Remplir le bac d'eau froide puis ajouter la quantité de solution pure de Deconex® (2)</p> <p><b>Dilution à 1% - min. 15 min d'immersion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 L d'eau : 50 ml de Deconex®</li> <li>10 L d'eau : 100 ml de Deconex®</li> <li>30 L d'eau : 300 ml de Deconex®</li> <li>150 L d'eau : 1500 ml de Deconex®</li> <li>180 L d'eau : 1800 ml de Deconex®</li> </ul> <p><b>Dilution à 2% - min. 15 min d'immersion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 L d'eau : 100 ml de Deconex®</li> <li>10 L d'eau : 200 ml de Deconex®</li> <li>30 L d'eau : 600 ml de Deconex®</li> <li>150 L d'eau : 3000 ml de Deconex®</li> <li>180 L d'eau : 3600 ml de Deconex®</li> </ul> <p><b>VIDANGE DU BAIN</b> Ajouter 1 ml de Deconex® Antifoam par litre de bain, mélanger doucement et vidanger le bac. Nettoyer/frotter les parois du bac avec de l'eau uniquement et un chiffon bleu changé après chaque utilisation.</p> <p><b>RENOUVELLEMENT DU BAIN</b> Avant de remplir le bac par pompe doseuse, contrôler les paramètres suivants : date de péremption du bidon de Deconex® valide, quantité suffisante de Deconex® dans le bidon, tuyau d'aspiration immergé dans le Deconex®.</p> <p>Remplir le bac de désinfection de solution prête à l'emploi et le couvrir.</p> <p><b>STABILITE MAXIMALE DU BAIN 14 JOURS</b> <b>En cas de fortes souillures, renouveler le bain au plus vite.</b></p>	<p><b>1. IMMERSION</b> Vider les contenants, ouvrir pinces et ciseaux, démonter le matériel composé de plusieurs pièces, remplir les tuyaux et autres cavités à l'aide d'une seringue contenant du Deconex® prélevé dans le bain. Immerger complètement le matériel dans le Deconex®.</p> <p>Matières élastiques comme le silicone, ne pas immerger plus de 60 min (risque d'absorption du Deconex®).</p> <p>Couvrir, si possible, les bacs de désinfection afin d'éviter l'évaporation.</p> <p><b>2. NETTOYAGE</b> Nettoyer/frotter minutieusement dans le bain avec un chiffon bleu changé après chaque utilisation tout matériel qui n'est pas acheminé à la Stérilisation centrale.</p> <p><b>3. RINCAGE</b> Rincer tout matériel abondamment à l'eau courante, en particulier les matières plastiques comme le silicone (risque de brûlure pour le patient).</p> <p><b>4. SECHAGE</b> Sécher le matériel qui n'est pas envoyé à la Stérilisation centrale avec un chiffon sec et non pelucheux (patin blanc) changé après chaque utilisation.</p>	<p> <b>Le Deconex® INSTRUMENT PLUS est un produit corrosif qui provoque des brûlures en cas de projection sur la peau ou dans les yeux. Eviter tout contact avec la peau et les yeux !</b></p> <p><b>Immersion du matériel</b> Port de gants de soins à usage unique.</p> <p><b>Préparation-vidange-renouvellement du bain et étapes 2-3 du traitement du matériel:</b></p> <p> Port de gants de ménage en nitrile à longues manchettes*. A porter par dessus des gants de soins à usage unique si les gants de ménage sont non personnels. Après le retrait des gants, se laver les mains à l'eau et au savon.</p> <p> Port de lunettes de protection.</p> <p>Ne pas mélanger le Deconex® INSTRUMENT PLUS avec d'autres produits (incompatibilités : acides, savon, autres désinfectants).</p> <p>Ne pas vaporiser le Deconex® INSTRUMENT PLUS et éviter la formation d'aérosols.</p> <p><b>Couvrir les bacs de désinfection afin d'éviter l'évaporation.</b></p> <p>*Eproc : No 927774 (S), 927775 (M), 927776 (L)</p>