

Procédure de nettoyage et de désinfection des appareils à ECG "Schiller MS 2015"

1. OBJET

Ce document décrit les modalités de nettoyage et de désinfection des appareils à ECG Schiller MS 2015.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Tous les services de la cité hospitalière possédant un appareil à ECG Schiller MS 2015.

3. RESPONSABILITES

Le nettoyage et la désinfection des appareils à ECG sont sous la responsabilité de celui qui l'utilise, soit des techniciens ECG ou autres membres du personnel soignant.

Le contrôle de l'application de cette procédure est sous la responsabilité des ICUS et ICS concernés.

4. DEROULEMENT

Les appareils à ECG sont des dispositifs médicaux classés matériel non critique, avec un risque infectieux bas. Une désinfection de bas niveau est donc recommandée.

1. Après chaque utilisation :

- Faire une désinfection du matériel utilisé ainsi que des parties de l'appareil à ECG et du chariot qui ont été touchées lors de la réalisation de l'ECG : écran et boîtier de l'appareil, plan de travail, poignée du chariot, poignée et tête de la douchette, câbles (tableau page suivante).

2. Une fois par jour :

- Faire une désinfection complète du chariot, incluant : plan de travail, poignée, support en plastique pour le matériel (intérieur et extérieur, en retirant le matériel qu'il contient), statif, pied du chariot et support pour la douchette (tableau page suivante).

Ne jamais :

- Utiliser un autre produit que celui mentionné (Meliseptol Sensitive Wipes) pour désinfecter l'appareil ECG et le chariot.
- Immerger l'appareil dans un liquide.
- Passer l'appareil ou ses accessoires à l'autoclave.
- Décoller les étiquettes du fabricant sur l'appareil.

5. DOCUMENTS ET TEXTES DE REFERENCE

- Mode d'emploi appareil de spirométrie et d'ECG à 12 pistes Schiller MS2010 et MS2015.
Référence : 2.510853. http://portail.intranet.chuv/mode_emploi_appareilsms2015_complet
- Fiche technique B. Braun Medical SAS, produits Meliseptol Wipes Sensitive.
<http://www.bbraun.fr/cps/rde/xchg/cw-bbraun-fr-fr/hs.xsl/products.html?prid=PRID00006591>
- Fiche technique Précautions Standard – dispositifs médicaux et matériel
www.hpci.ch / documents / précautions standard / 5.Dispositifs médicaux et matériel / Lien : FT dispositifs médicaux et matériel
Lien direct : http://www.hpci.ch/files/documents/ft100/hpci_w_ft_00051.pdf

Nettoyage et désinfection des appareils à ECG « Schiller MS 2015 »

Après chaque utilisation : Désinfection de l'appareil à ECG et du matériel utilisé

1. Eteindre l'appareil. Il ne doit pas être branché au secteur.
2. Vérifier l'intégrité des câbles, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
3. Se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique.
4. Mettre des gants pour manipuler le produit détergent-désinfectant.
5. A l'aide d'une lingette imprégnée « Meliseptol Wipes Sensitives », nettoyer immédiatement toutes souillures visibles, puis jeter la lingette.
6. Prendre une nouvelle lingette et procéder à la désinfection des parties de l'appareil et du chariot qui ont été touchées lors de la réalisation de l'ECG : écran et boîtier de l'appareil, plan de travail, poignée du chariot, poignée et tête de la douchette, câbles. **Ne pas désinfecter la vitre de la douchette.**
7. Désinfecter les câbles un par un. Saisir la base du câble avec une lingette, et le faire glisser délicatement de 20 cm à la fois dans la lingette. Ne pas désinfecter toute la longueur du câble en une seule fois afin d'éviter une agglutination du gainage isolant.
8. Laisser sécher le produit sans essuyer, pour un temps de contact de 5 minutes.
9. Ne pas laisser le produit désinfectant s'écouler ou s'accumuler dans les connecteurs, les loquets ou les interstices. Essuyer le surplus. Si du liquide s'introduit dans les connecteurs, sécher la zone concernée à l'air tiède.
10. Ranger les câbles sur le support prévu à cette fin une fois la désinfection terminée.
11. Désinfecter le matériel utilisé lors de la réalisation de l'ECG (ex : manche de tondeuse, bouteille de gel ultrason) à l'aide des mêmes lingettes, avant de le ranger sur le chariot.
12. Jeter les lingettes à la poubelle et retirer les gants.
13. Se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique.

Une fois par jour : Désinfection complète du chariot

1. Débrancher l'appareil du secteur en retirant la fiche de connexion.
2. Se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique.
3. Mettre des gants pour manipuler le produit détergent-désinfectant.
4. Retirer tout le matériel contenu dans le support du chariot.
5. A l'aide d'une lingette imprégnée de marque « Meliseptol Wipes Sensitives », désinfecter toutes les parties du chariot : plan de travail, poignée, support en plastique pour le matériel (intérieur et extérieur), statif, pied du chariot et support pour la douchette.
6. Laisser sécher le produit sans essuyer pour un temps de contact de 5 minutes.
7. Jeter les lingettes à la poubelle et retirer les gants.
8. Se désinfecter les mains avec la solution hydroalcoolique.
9. Replacer le matériel sur le support.