

Nettoyage et désinfection du matériel de physiothérapie

1. OBJET

Le matériel de soins de physiothérapie et ergothérapie doit être nettoyé et désinfecté avec rigueur afin de prévenir les infections nosocomiales et la transmission de germes multi-résistants.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Service de physiothérapie

3. RESPONSABILITES

Physiothérapeute chef
Physiothérapeutes chefs dans les services
Physiothérapeutes chefs dans les unités

4. PROCEDURE

1. Entretien du matériel de physiothérapie : Voir tableau récapitulatif ci-après

Liste des abréviations utilisées :

C	: Matériel Critique	UU	: Matériel à Usage Unique	PU	: Patient Unique
SC	: Matériel Semi-Critique	UM	: Matériel à Usage Multiple	PM	: Patient Multiple
NC	: Matériel Non Critique				

2. Salles de traitement

Il est recommandé que les patients se désinfectent les mains par friction avec la solution hydro- alcoolique :

- à l'entrée des salles de traitement (salles de réadaptation fonctionnelle, salles de gymnastique, salle de musculation, ...)
- avant l'utilisation d'aides de marche

La désinfection des appareils de la salle de musculation et salle de cardiovasculaire à Nestlé est exigée 1x/semaine. Les parties en contact direct avec la peau du patient (comme les parties en contact avec les mains) doivent être désinfectées avec des lingettes imbibées d'alcool entre chaque patient. Lors de souillures (salive ou autre liquide biologique) nettoyer et désinfecter avec des lingette d'Incidin Plus® 0.5%.

Les appareils utilisés occasionnellement sont désinfectés avec la solution détergente/désinfectante pour surfaces en vigueur dans l'institution avant d'être stockés en réserve.

3. Patients en mesures additionnelles

Le patient colonisé/infecté par des germes résistants aux antibiotiques ou des germes transmissibles et qui est en mesures additionnelles (contact, gouttelettes ou aérosol), **ne peut en principe pas quitter la chambre, ni le service, sauf :**

- pour des raisons médicales (examens, traitements,...) **avec l'autorisation du médecin**
- pour toute autre raison **avec l'autorisation de l'unité HPCI_CHUV**

5. DOCUMENTS ASSOCIES (lien vers : site www.hpci.ch et [V-Doc CHUV](#))

- [Règles d'hygiène hospitalière lors de physiothérapie à l'extérieur de la chambre au bénéfice des patients sous mesures additionnelles de contact](#) (réf. v-doc [SMPH_W_REC_00035](#))
- [PED - Désinfection des jouets en pédiatrie](#) (réf. v-doc [SMPH_W_REC_00020](#))
- [Désinfection et nettoyage du matériel de soins immergeable](#) (Deconex®) (réf. v-doc [SMPH_W_FT_00046](#))
- [Nettoyage et désinfection de l'environnement direct du patient par les soignants](#) (Incidin®) (réf. v-doc [SMPH_W_FT_00047](#))

6. REFERENCES

- Site internet "Hygiène, Prévention et Contrôle de l'Infection – Vaud" : www.hpci.ch
- Ordonnance fédérale sur les dispositifs médicaux (accessible sur : <https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995459/index.html>)
- Swissmedic Dispositifs médicaux Retraitement : <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/dispositifs-medicaux/retraitement-et-maintenance/retraitement.html>
- Recommandations du fabricant des différents dispositifs médicaux

7. VALIDATION

- Version 1.3 : 09.02.2010 par Médecin SMPH (CB) et infirmière PCi SMPH (MJT)
09.02.2010 par Chefs physiothérapie (ET, RP)
- Version 2.0 : mars 2014 par Médecin SMPH (LS) et infirmière PCi SMPH (MJT)
oct. 2014 par physiothérapie (DT)
Mise en application le 14.10.2014
- Version 3.0 : juillet 2019 par SMPH (LS); infirmière PCi SMPH (MLD); par physiothérapie (DT)
- Version 4.0 : juillet 2023 mise à jour par HPCI CHUV (LS), infirmière PCi (MGW) Tab p. 6

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Physiothérapie respiratoire								
Aérosolthérapie								
Aérosolthérapie pneumatique								
Réservoir/cuve	SC	X	–	PU	Rincer à l'eau, sécher et ranger sur une surface propre entre deux utilisations	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Masque facial					Nettoyer 1x/jour à l'eau et au savon et désinfecter avec une lingette imbibée d'alcool			
Embout et accordéon					Désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée d'alcool			
Collerette et accordéon scotché					Désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée d'alcool Jeter si souillé			
Aérosolthérapie spray Chambre inhalation, cartouche	SC	X	–	PU Conserver pendant le séjour du patient	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée d'alcool si souillé Ranger dans un sachet plastique dédié	Jeter en fin de traitement ou le patient le conserve à son départ	Déchets urbains	–
Aérosolthérapie poudre	SC	X	–	PU Conserver pendant le séjour du patient	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée d'alcool si souillé Ranger dans un sachet plastique dédié	Jeter en fin de traitement ou le patient le conserve à son départ	Déchets urbains	–
Lors de l'administration d'antibiotique par nébulisation: risque d'obstruction progressive du filtre Dès annonce par le patient de difficulté respiratoire anormale, changer le filtre (approximativement 2e ou 3e jour d'utilisation)								

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM	
		UU	UM						
		Usage unique	Usage multiple						
Aspiration (Système d'aspiration mural, avec bocal)									
Raccords	NC	X	–	PU	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Jeter au départ du patient	Déchets urbains	–	
Tuyau allant du système d'aspiration au Receptal®							–	–	–
Receptal®	SC	–	–	PU A changer aux 7 jours ou si souillé			–	–	
Bocal Receptal®	NC	–	X	PM			Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	A retraiter dans le service	Reste sur place
Tuyau allant du Receptal® vers le patient	SC	X	–	PU A changer aux 7 jours ou si souillé			Jeter au départ du patient	Déchets urbains	–
Humidification									
Vapeur chaude Kendall (bloc bleu) MR 850	SC	–	X	PM Conserver pendant le séjour du patient	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée	
Circuit (Tubulure, marmite, interface)	SC	X	–	PU A changer aux 7 jours ou si souillé			Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Vapeur froide Inspiron	SC	X	–	PU A changer aux 7 jours ou si souillé	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–	

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU	UM					
		Usage unique	Usage multiple					
Vapeur froide SonoDrop®	SC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	A retraiter dans le service	–
Réservoir USV avec quartz (cuve)	SC	–	X	PM	1x/jour: Désinfecter avec une lingette imbibée de la solution désinfectante Mélisptol® (sans alcool) Tous les 7 jours: vider le réservoir, descendre en STER dans boîte rouge (désinfection et stérilisation)	Désinfecter et stériliser en STER	A retraiter en STER	–
Tuyau patient et du ventilateur	SC	X	–	PU	Changer toutes les 24h	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Accessoires	NC	–	X	PM	Désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée d'alcool	Désinfecter avec une lingette imbibée d'alcool	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Système eau stérile ISAPAK®	NC	X	–	PU	Jeter et remplacer la cuve de nébulisation si vide	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Adaptateur	SC	–	X	PM	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Désinfecter et stériliser en STER	A retraiter en STER	–

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Oxygénothérapie bas débit								
Appareil* oxygénothérapie *(source murale d'air ou O₂ ou appareil à propulsion d'air, manomètre à pression ou débitmètre air ou O₂)	SC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces si souillé	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	–	Rampe dédiée
Humidificateur à bulles (barboteur à O₂) Par ex : Aquapak® (eau stérile)	SC	X		PM Mettre la date d'ouverture du pack et le changer quand il est vide et/ou 30 jours après l'ouverture	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces si souillé	Désinfection extérieure du matériel avec une lingette imbibée de la solution détergente/désinfectante pour surfaces	Déchets urbains	–
Interfaces Oxygénothérapie								
Lunettes à oxygène	SC	X	–	PU	Changer aux 7 jours ou plus si souillé Stocker sur surface propre	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Masque simple, Masque à haute concentration								
Raccord tuyau à oxygène					Changer aux 7 jours ou plus si souillé			
Rallonge tuyau à oxygène								

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Oxygénothérapie Haut Débit								
Appareil pour haut débit O₂ Blender, humidificateur, statif	SC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Circuit Tubulures et marmite	SC	x	–	PU	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Interface Lunette nasale, embout trachéal	SC	x	–	PU	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Trachéotomie								
Collerettes trachéales	SC	X	–	PU	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Lacet/trachéotomie								

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
VNI								
Appareil BIPAP, CPAP	SC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Appareil, écrans et boutons: désinfecter avec une lingette/comresse imbibée d'éthanol ou avec la solution détergente/désinfectante pour surfaces ATTENTION: Si isolement AEROSOL, ne jamais utiliser de VNI turbine (si découvert après, procédure de quarantaine)	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Valve expiratoire Whisper swivel ou aéroclik	SC	–	X	PM	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	En fin d'utilisation, pas de pré-désinfection dans le service - Mettre la valve expiratoire dans un sac plastique et déposer dans une caisse rouge identifiée "physiothérapie service" - Y joindre complété le bon jaune de ramassage pour l'envoi en STER	A retraiter en STER	Emballage propre dans zone propre dédiée
Filtre antibactérien blanc-jaune	SC	x	–	PU	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Circuit blanc, blanc et bleu	SC	x	–	PU	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Masque de ventilation Vygon	SC	X	–	PU Conservé pendant séjour patient	Désinfecter 1x/j avec une lingette imbibée d'éthanol Stocker sur une surface propre Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Harnais en caoutchouc								
Masque de ventilation (Resmed, Philips, Drager) Coque rigide	SC	–	X	PM Conservé pendant le séjour du patient	Désinfecter 1x/j avec une lingette imbibée d'éthanol Stocker sur une surface propre Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Masque adulte: Pas de pré-désinfection dans le service en fin de traitement - Mettre le masque et le harnais dans un sac plastique et déposer dans une caisse rouge identifiée "physiothérapie service" - Y joindre complété le bon jaune de ramassage pour l'envoi en STER pour passage en laveur désinfecteur	A retraiter en STER	Emballage dans un sachet en polyéthylène, zone propre dédiée
Jupe silicone					Désinfecter 1x/j avec une lingette imbibée d'éthanol Laisser sécher avant application			
Harnais en tissu					Changer aux 7 jours ou plus si souillé Stocker sur une surface propre			
Pour les masques de ventilation PM de pédiatrie, le matériel est retraité dans le service								
Raccords pour VNI 22/22 ou 15/22	SC	X	–	PU	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Valve de PEEP Verte	NC	–	X	PM	Changer aux 7 jours ou plus si matériel souillé	<p>En fin d'utilisation, pas de pré-désinfection dans le service</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mettre la valve de PEEP dans un sac plastique et déposer dans une caisse rouge identifiée "physiothérapie service" - Y joindre complété le bon jaune de ramassage pour l'envoi en STER pour une désinfection en laveur désinfecteur 	A retraiter en STER	Emballage dans un sachet en polyéthylène, zone propre dédiée
Valve de PEEP Rouge	NC	X	–	PU		Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Divers								
Appareil percussif IPV, Ventilation à percussion, intrapulmonaire	SC	–	X	PM Conservé pendant le séjour du patient	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Désinfecter l'appareil avec le désinfectant pour surfaces	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Circuit	SC	–	X	PM	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Circuit avec 4 tubulures Pas de pré-désinfection dans le service - Mettre les tubulures dans un sac plastique et ensuite déposer dans une caisse rouge identifiée "physiothérapie service" - Matériel désinfecté en laveur désinfecteur en STER	A retraiter en STER	Emballage dans un sachet en polyéthylène, zone propre dédiée
Embout buccal	SC	X	–	PU	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Bulleau	SC	X	–	PU	La bouteille d'eau Henniez/flacon d'eau stérile utilisée et la tubulure doivent être changés aux 24 heures	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Spirométrie incitative Inspirex, Spirobal	SC	X	–	PU Conservé pendant le séjour du patient	Changer 1x/mois ou plus si souillé, stocker sur une surface propre entre deux utilisations Embout: Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée d'éthanol entre deux utilisations	Jeter en fin de traitement ou le patient le conserve à son départ	Déchets urbains	–

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Peak flow Meter Débit expiratoire ou DEP	SC	X	–	PU Conserver pendant le séjour du patient	Changer 1x/mois ou plus si souillé, stocker sur une surface propre entre deux utilisations Embout: Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée d'éthanol entre deux utilisations	Jeter en fin de traitement ou le patient le conserve à son départ	Déchets urbains	–
Sangles en tissu pour drainage thoracique	NC	–	X	PM	Changer aux 7 jours ou plus si souillé	Pas de prédésinfection dans le service Mettre la sangle en tissu dans un sac plastique plus et le déposer dans une caisse rouge identifiée "physiothérapie service" - Y joindre complété le bon jaune de ramassage pour l'envoi en STER pour une désinfection en laveur désinfecteur	A retraiter en STER	Emballage dans un sachet en polyéthylène, zone propre dédiée
Spirométrie électronique MPM, Micro plus, Easyware								
Filtre et embout carton	SC	X	–	PU	Embout carton: changer si abîmé Filtre: changer aux 7 jours	Jeter en fin de traitement	Déchets urbains	–
Turbine et adaptateur		–	X	PM	Désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée d'éthanol	Désinfecter avec une lingette imbibée d'éthanol entre deux patients, turbine comprise	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Physiothérapie mobilisation/rééducation Lors d'un isolement, le matériel utilisé reste en chambre jusqu'à la fin du traitement ou au départ du patient								

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Appareil électrostimulation								
Compex								
Cables et appareil	NC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Electrodes		X	–	PU			Jeter les électrodes en fin de traitement	Déchets urbains
Attelle genou	NC	X	–	PU	Nettoyer/désinfecter 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces ou plus si souillé	Jeter ou remettre au patient à la sortie	Déchets urbains	–
Bacs pour attelles	NC	–	X	PM	<u>Si matériel souillé:</u> nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	Nettoyage/désinfection 1x/semaine avec un lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Ballons	NC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter après utilisation avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces		A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Barres parallèles								
Cônes de parcours								
Coussins de table, rouleau	NC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter après utilisation avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces		A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU	UM					
		Usage unique	Usage multiple					
Coussins de position "fauteuil" avec scratches	NC	–	X	PM	Mettre une housse plastifiée si patient en mesures additionnelles (RAFA 942 309), housse à jeter au départ du patient	Nettoyage/désinfection avec une lingette imbibée de la solution détergente/désinfectante pour surfaces. Si isolement, les scratches sont trempés dans une solution désinfectante pour instruments puis rincés et séchés	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Fauteuil roulant et ses accessoires (appui-dos, appui-tête, cale-pieds, pompe coussin, tablette, poignées, accoudoirs, rallonges, set ceinture, etc.)	NC	–	X	PM	Nettoyage/désinfection 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	Nettoyer/désinfecter avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Gilet	NC	X	–	PU	A jeter si souillé et changer par du matériel propre	A jeter ou à remettre au patient à la sortie	Déchets urbains	–
Haltères	NC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter après utilisation avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces		A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Kinetec	NC	–	X	PM	Nettoyage/désinfection 1x/jour avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces Changer protection moltex 1x/jour	Entre chaque patient en fin de traitement avec une lingette imbibée de la solution détergente/désinfectante pour surfaces	A retraiter dans le service	Dans zone propre dédiée
Motomed (tous modèles)	NC	–	X	PM	Nettoyer/désinfecter après utilisation			

Matériel	Catégorie de matériel	Type de matériel		Type et durée d'utilisation PU – Patient Unique PM – Patient Multiple	Entretien et stockage entre deux utilisations chez un même patient	Entretien du matériel en fin d'utilisation et/ou entre deux patients	Mode d'élimination	Stockage du matériel à UM
		UU Usage unique	UM Usage multiple					
Moyens auxiliaires de marche Déambulateurs, Taurus et cannes	NC	–	X	PM	avec une lingette imbibée du détergent/désinfectant pour surfaces			
Panier à ballons	NC	–	X	PM				
"Petit matériel Neuro"	NC	–	X	PM				
Sac de sable	NC	–	X	PM				
STEP	NC	–	X	PM				
Table de traitement	NC	–	X	PM				
Tapis de sol mousse	NC	–	X	PM				
Verticalisateurs ERIGO ou Standing	NC	–	X	PM				