

Nettoyage des chariots de réanimations dans les services de la cité hospitalière : recommandations générales

1. OBJET

Donner les recommandations de nettoyage des chariots de réanimation des services afin d'en assurer la propreté et d'éviter la propagation des germes.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Tous les services de la cité hospitalière ayant un chariot de réanimation.

3. RESPONSABILITE

Personnel soignant

Le contrôle de l'application de cette recommandation est sous la responsabilité de l'ICUS et de l'ICS de chaque service concerné.

4. PROCEDURE

Principes généraux :

- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les chariots de réanimation doivent être recouverts en tout temps d'une housse plastique les protégeant des poussières.
- Tout matériel ou médicament souillé doit être jeté et remplacé.
- Toutes souillures présentes sur le chariot ou les appareils doivent être nettoyées immédiatement.
- Une fiche de traçabilité des nettoyages doit être disponible sur le chariot et doit être archivée pendant 5 ans minimum sur le service. Un exemple de fiche de traçabilité des nettoyages est disponible à la fin de ce document.

Nettoyage :

- Le *nettoyage extérieur* du chariot doit se faire avec un chiffon humide et un détergent-désinfectant à base de glucoprotamine en vigueur dans l'institution (ex : Incidin).
- Le *nettoyage intérieur* des tiroirs et des contenants à médicaments doit se faire avec un chiffon humide et un détergent-désinfectant à base de glucoprotamine en vigueur dans l'institution (ex : Incidin).
 - Un nettoyage intérieur des tiroirs et des contenants à médicaments doit se faire – à chaque fois - immédiatement après une procédure de réanimation lorsque le tiroir a été ouvert pendant la procédure.

Fréquence :

- Le *nettoyage extérieur* du chariot doit se faire après chaque utilisation et une fois par année si le chariot n'a pas été utilisé.
- Le *nettoyage intérieur* des tiroirs et des contenants à médicaments doit se faire au minimum une fois par année ou immédiatement après l'ouverture des tiroirs s'ils ont été souillés.

Exemple : Fiche de traçabilité des nettoyages du chariot de réanimation

Année Mois	Dates Jour	Initiales	Remarques

Année Mois	Dates Jour	Initiales	Remarques