

## Retraitement des dispositifs médicaux selon les risques infectieux

Catégories de dispositifs	Définitions, exemples	Niveau de risque infectieux	Objectif	Méthode et moyen
<b>Non critique</b>	<b>Dispositif n'entrant en contact qu'avec la peau intacte du patient</b> Ex : manchette à pression, stéthoscope, coupe-ongles, table de nuit, lit, vase, urinal, ...	<b>Risque bas</b>	Nettoyage et désinfection de bas niveau	Utiliser un désinfectant éliminant la plupart des microorganismes (au minimum les bactéries).
<b>Semi-critique</b>	<b>Dispositif entrant en contact avec des muqueuses non stériles sans effraction, ou la peau lésée superficiellement.</b> Ex : matériel pour soins de la sphère ORL (bouche, nez, yeux), spéculum vaginal, thermomètre rectal / buccal, ...	<b>Risque moyen</b>	Nettoyage et désinfection de niveau intermédiaire	Utiliser un désinfectant éliminant tous les microorganismes (bactéries, virus, champignons, mycobactéries) à l'exception de quelques spores.
<b>Critique</b>	<b>Dispositif entrant en contact avec un site corporel stérile.</b> Ex : instruments chirurgicaux ou pour soins de plaies, cathéters, sondes urinaires, d'aspiration, laryngoscopes, ...	<b>Risque élevé</b>	Nettoyage et stérilisation ou Désinfection de haut niveau	Détruire tous les microorganismes y compris les spores (stérilisation à la vapeur d'eau saturée pendant 18 min. à 134°C).

- Toujours privilégier l'utilisation de matériel à usage unique
- Traiter le matériel en fonction de son utilisation si matériel à usage multiple
- Toujours manipuler le matériel souillé avec des gants
- Ne jamais retraiter du matériel à usage unique
- Toujours traiter le matériel à usage multiple après chaque utilisation